

Restylane
SKINBOOSTERS™

GALDERMA

EST. 1981

GET THE
Glow

EIN PRODUKT DES GALDERMA
AESTHETICS PORTFOLIOS

Restylane
SKINBOOSTERS™

DAS





RESTYLANE® SKINBOOSTERS™ *

Original

Das Geheimnis jugendlich frischer, schöner Haut und einem strahlenden Teint liegt in der ausreichenden Feuchtigkeitsversorgung der tieferen Hautschichten.

Die Restylane® Skinboosters™ überzeugen seit jeher durch ihre einzigartige Technologie und Qualität.

Sie nutzen die Fähigkeit des Hyalurons, die natürliche Zusammensetzung der Haut wiederherzustellen, die Hydratation zu verstärken und die Elastizität zu verbessern.¹⁻³

Hyaluron finden wir natürlicherweise in unserem Körper, wo es die Aufgabe hat, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und weich und geschmeidig zu halten.

Ab einem Alter von 28 Jahren nimmt der Anteil an körpereigenem Hyaluron jedes Jahr um etwa 1% ab.

Bei der Behandlung mit Restylane® Skinboosters™ werden Mikrodepots des stabilisierten Hyalurons unter die Hautoberfläche injiziert, um so eine langfristige, tiefe Hydratation von innen zu gewährleisten. Schrittweise werden durch die Behandlungen Straffheit und Spannkraft Ihrer Haut und das gesamte Hautbild verbessert.⁴

Lassen Sie Ihren Teint strahlen – mit Original Restylane® Skinboosters™.

ERLEBEN SIE DEN

Walterschie

Ein strahlendes Hautbild im Gesicht, am Hals, am Dekolleté und an den Händen⁵⁻¹¹ dank stabilisiertem Hyaluron² zur lang anhaltenden Tiefenhydratation der Haut.

Es gibt viele Ästhetikprodukte auf Basis von Hyaluron. Die meisten enthalten jedoch nicht-stabilisiertes Hyaluron, das in der Haut schon nach wenigen Tagen abgebaut wird und somit eine entsprechend kurze Wirkdauer hat.

EINZIGARTIGE TECHNOLOGIE

Original Restylane® Skinboosters™ hingegen enthalten stabilisiertes Hyaluron auf Basis der einzigartigen und patentierten NASHA** -Technologie.

Dessen bessere Wirksamkeit, als auch die längere Wirkdauer verglichen mit nicht-stabilisiertem Hyaluron wurde in klinischen Studien nachgewiesen.

SICHER UND WIRKSAM

Zudem bieten Original Restylane® Skinboosters™ ein umfassend dokumentiertes Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil mit mehr als 6,5 Millionen Behandlungen*** weltweit und 15 Jahren klinischer Erfahrung.¹²



ed



DER Glow

FÜR GESICHT, HALS UND DEKOLLETÉ

Der Frischeboost für strahlend schöne Haut.

Die Innovation für ein strahlendes Hautbild ist das Behandlungskonzept der Tiefenhydratation mit den Restylane® Skinboosters™.

Eine Behandlung mit Restylane® Skinboosters™ füllt sanft und großflächig verloren gegangenes Hyaluron in der Haut auf und sorgt so von innen heraus für natürlich strahlende Haut und einen frischen Teint.

REDUZIERUNG VON FALTEN UND UNEBENHEITEN

Die Restylane® Skinboosters™ binden Wasser und sorgen so für eine bessere Elastizität der Haut.¹⁻³

Durch die Behandlung mit Restylane® Skinboosters™ werden feinere Fält-

chen reduziert und sanft geglättet. Auch können Unebenheiten wie z. B. eingesunkene Aknenarben durch die Behandlung minimiert werden.

ÜBERZEUGENDE ERGEBNISSE

Sie werden eine Verbesserung der Hautqualität und -spannkraft feststellen – und das bis zu 12 Monate nach der Behandlung.^{***,11}



Trockene Haut

RESTYLANE™
SKINBOOSTERS™



Verbesserung der sichtbaren
Hautqualität durch stabilisierte
HA-Depots in der Haut



Detailansicht des Gesichts
vor der Behandlung



Detailansicht des Gesichts
nach der Behandlung



Detailansicht des Gesichts
vor der Behandlung



Detailansicht des Gesichts
nach der Behandlung



Detailansicht des Dekolleté
vor der Behandlung



Detailansicht des Dekolleté
nach der Behandlung

Restylane
SKINBOOSTERS™



Restylane

ORIGINAL
Restylane

SKINBOOSTERS™ VITAL

Li soconide

 GALDERMA

Injectable: Gel w/ lidocaine 1ml

FEUCHTIGKEITSBOOST

FÜR DIE


Hände

Original Restylane® Skinboosters™ für Ihre Hände bei den ersten Anzeichen von Hautalterung und Trockenheit.


Nach dem Gesicht sind die Hände der Bereich, der dem Sonnenlicht am meisten ausgesetzt ist. Auch das tägliche Waschen und Desinfizieren der Hände fordert seinen Tribut von unserer Haut - heute mehr denn je.

Restylane® Skinboosters™ wurden

speziell für die Tiefenhydratation der Haut entwickelt. Sie spenden der Haut von innen wertvolle Feuchtigkeit, die lange anhält und für eine verbesserte Elastizität sorgt.¹⁻³ Zusätzlich reduzieren Restylane® Skinboosters™ die Hautrauigkeit.⁶

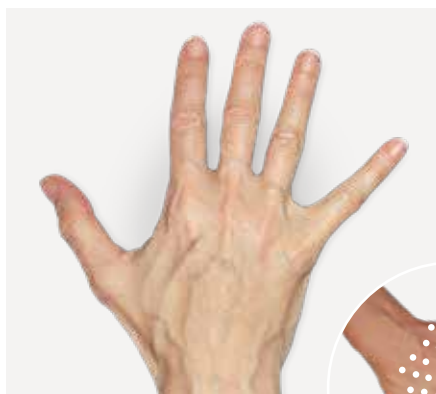

Vorher

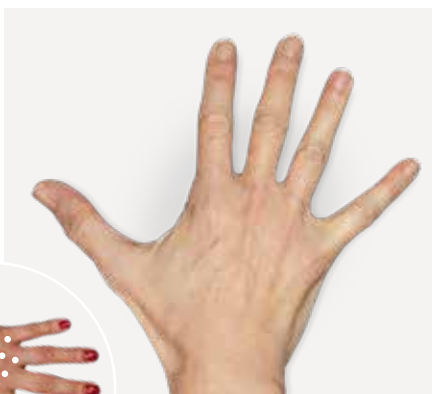

Nachher

Ergebnis nach der dritten Behandlung mit Restylane® Skinboosters™



Injektionsbereiche

Überzeug

GLATTE UND HYDRATISIERTE HAUT

Die Restylane® Skinboosters™ binden Wasser und sorgen für eine verbesserte Elastizität.¹⁻³

LANG ANHALTENDE ERGEBNISSE

Restylane® Skinboosters™ bieten eine klinisch belegte **Wirkdauer von bis zu 12 Monaten**.^{11, ****}

JUGENDLICHE FRISCHE

Die Behandlung mit Restylane® Skinboosters™ kann auch **präventiv** angewendet werden, um die jugendliche Frische der Haut zu bewahren.

VIELFÄLTIGE INDIKATIONSBEREICHE

Anwendbar im Gesicht^{5, 6, 9, 10}, Hals⁵, Dekolleté^{9, 10} und Hände.^{9, 10, 13}



ende

WIRKUNG



100 %

DER ANWENDER
ERKLÄRTEN, DASS
IHRE ERWARTUNGEN
MIT DEN
SKINBOOSTERS™
VITAL ERFÜLLT
WURDEN.⁶

100 %

DER ANWENDER
WÜRDEN DIE
BEHANDLUNG MIT
DEN SKINBOOSTERS™
VITAL WIEDERHOLEN.⁶

A REAL

Story

Eine Patientin berichtet über ihre Behandlung mit Original Restylane® Skinboosters™

„Bevor ich die Restylane® Skinboosters™ ausprobiert habe, hatte ich noch nie eine Ästhetik-Behandlung dieser Art erhalten. Mir wurde erzählt, was die Behandlung bewirken kann und ich war sehr zuversichtlich, dass ich einige dieser Ergebnisse auch bei mir feststellen würde!

Mein Behandler klärte mich darüber auf, dass die Ergebnisse schrittweise im Behandlungsverlauf auftreten und ich die Verbesserung meiner Hautqualität auch nach meiner dritten Behandlung weiter beobachten würde. Ich konnte es nicht erwarten, mit der Behandlung zu beginnen.

Die Behandlung selbst verlief besser

als ich erwartet habe. Es war gut zu tolerieren. Ich fühlte nur ein paar kleine Nadelstiche und mein Behandler war sehr behutsam.

Ich fand es toll, dass ich direkt nach der Behandlung zu meinen Alltagsaktivitäten zurückkehren konnte.

Nach meiner zweiten Behandlung stellte ich tatsächlich einen Unterschied fest. Meine Haut begann zu strahlen und ich fühlte mich viel frischer. Ich konnte auch fühlen, wie sich die Struktur meiner Haut verbessert hatte und mein Gesicht sich weicher anfühlte. Außerdem hatte ich weniger feine Linien an meinen Wangen und um den Mund herum.“



„Trotz gesundem Lebensstil und Ernährung, fehlte mir immer eine gesunde Ausstrahlung. Bis zu meiner ersten Behandlung mit den Restylane® Skinboosters™. Etwa drei Wochen nach der ersten Behandlung hatte ich einen natürlichen „Glow“. Jeder sagt mir, dass ich frischer aussehe und meine Haut strahlt.

„Viele Behandlungen konzentrieren sich auf das Gesicht, aber auch das Dekolleté, den Hals und die Hände sollte man gleichermaßen einbeziehen und nicht vernachlässigen.“

GUT ZU WISSEN

Was Sie rund um die Behandlung mit Restylane® Skinboosters™ wissen sollten.

VOR DER BEHANDLUNG

Ihr Behandler wird Sie im Rahmen eines detaillierten Aufklärungsgesprächs umfassend über die Behandlung informieren. Folgende Punkte werden dabei mit Ihnen besprochen:

- Ihre relevante Krankengeschichte (z. B. Erkrankungen, Medikamenteneinnahmen, vorherige kosmetische Behandlungen und Operationen, Schwangerschaft und Stillzeit)
- Möglichkeiten und Grenzen einer Behandlung
- Mögliche Risiken und Nebenwirkungen
- Kosten der Behandlung sowie möglicher Folgebehandlungen

Beachten Sie, dass Ihre Fragen zu Ihrer vollsten Zufriedenheit beantwortet werden.

WÄHREND DER BEHANDLUNG

- Bei jeder Behandlung wird der Behandler mit einer sehr feinen Nadel oder Kanüle geringe Hyaluronmengen in mittlere bis tiefe Hautoberflächen injizieren.
- Wenn Ihnen der Gedanke an eine Spritze und/oder Schmerzen Unbehagen bereitet, können Sie auf die Produkte zurückgreifen, die bereits ein Anästhetikum enthalten, oder Ihr Behandler kann vor der Behandlung eine Betäubungscreme auftragen, um die Behandlung für Sie angenehmer zu gestalten.
- Eine Behandlung dauert gewöhnlich zwischen 15 und 20 Minuten.

NACH DER BEHANDLUNG

- Nach der Behandlung kann eine leichte Rötung oder Hämatombildung um den Behandlungsbereich auftreten. Diese Symptome klingen gewöhnlich innerhalb einiger Tage von selbst wieder ab. In einigen Fällen können jedoch beispielsweise Hämatome bis zu 2 Wochen bestehen.
- Zur Reduzierung einer möglichen Schwellung kann der Behandler Ihnen das Auflegen von Kühlpads auf die Behandlungsstelle empfehlen.
- Sie sollten unmittelbar nach der Behandlung zunächst kein Make-up auftragen. Nach ungefähr 24 Stunden können Sie gegebenenfalls Rötungen oder Hämatome mit einem leichten Make-up abdecken.
- Vermeiden Sie übermäßige Sonnenstrahlung und extreme Kälte mindestens so lange, bis eine anfängliche Schwellung bzw. Rötung abgeklungen ist.

ERGÄNZENDE BEHANDLUNG

RESTYLANE® FILLER

Weiterhin bietet die umfassende Restylane® Hyaluron-Filler Serie eine große Bandbreite an spezifischen Gelen, die für die Behandlung verschiedener Gesichtsbereiche und Hauteigenschaften zugeschnitten sind, wie z. B.:

- Aufbau von Lippenvolumen
- Reduzieren von Linien und Falten im Mund-, Nasen-, Stirn- und Augenbereich
- Betonung und Wiederherstellung von Gesichtszügen durch gezielte Konturierung und Formgebung

Interessante und ausführlichere Infos rund um das Restylane® Aesthetics Portfolio und unsere **Facharztsuche** finden Sie unter:

www.galdermaaesthetics.de

- * Erstes (injizierbares) stabilisiertes HA-Produkt am Markt zur Verbesserung der Hautqualität mit mehr als 15 Jahren klinischer Erfahrung und 6,5 Millionen Behandlungen weltweit.
- ** Nicht-Animalisches stabilisiertes Hyaluron
- *** Gemäß bei Galderma verfügbarer Daten: interpolierte Anzahl an Behandlungen, basierend auf der Anzahl verkaufter Spritzen.
- **** Nach der ersten von insgesamt 3 erfolgten Aufbaubehandlungen

¹Gubanova EI et al. Poster presented at IMCAS 2015 | ²Distante F et al. Dermatol Surg 2009;35(S1):389-93 |

³Gubanova EI et al. J Drugs Dermatol 2015;14(3):288-98 | ⁴Lee BM et al. Arch Plast Surg 2015;42(3):282-287

⁵Gubanova EI et al. Esteticheskaya Meditsina (Aesthetic Medicine) 2010; 1: 94-98 | ⁶Kerscher M et al. Dermatol Surg 2008; 34 (5):720-726 | ⁷Distante F et al. Dermatol Surg 2009; 35 (Suppl 1):389-393 |

⁸Williams S et al. J Cosmetic Dermatol 2009; 8:216-225 | ⁹Streker M et al. J Drugs Dermatol 2013;12(9):990-

994 | ¹⁰Kerscher M et al. Stabilized hyaluronic acid-based gel of non-animal origin for rejuvenation of the face,

hands and décolletage using an Injector device. Poster vorgestellt beim International Master Course on Aging

Skin (IMCAS), Paris, Januar 2010 | ¹¹Gubanova EI et al. J Drugs Dermatol. 2015 Mar 1;14(3):288-95 | ¹²Gemäß

bei Galderma verfügbaren Daten: CE-Zertifizierung in 2004 | ¹³John H E, Price D. Patient Preference and

Adherence 2009;3:225-230

GALDERMA

EST. 1981

KONTAKT



Galderma Laboratorium GmbH

Toulouser Allee 23a

40211 Düsseldorf

Germany

www.galdermaaesthetics.de

galderma.aesthetics.de  Aesthetics by Galderma Deutschland 

Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Es darf ohne vorherige Genehmigung durch Galderma weder vervielfältigt, verbreitet, bearbeitet oder umgestaltet werden.